

# PerioTabs

## FR • Description du produit et usage prévu

PerioTabs aide à réduire la gingivite, la périodontite, la péri-mucosite et la péri-implantite. Ce produit est utilisé pour brosser les dents et les gencives. Utilisez le produit uniquement sur recommandation de votre dentiste. Dans tous les autres cas, consultez votre dentiste/médecin avant tout usage. La procédure consiste en un brossage des dents et des gencives avec les comprimés fournis ayant été préalablement dissous dans de l'eau tiède.

Chaque kit contient 10 petits comprimés effervescents (1 comprimé par jour pendant 10 jours). Un comprimé doit être dissous dans 15 ml d'eau tiède dans le récipient spécialement prévu afin de créer la solution de brossage gingival et dentaire. Le brossage s'effectue à l'aide d'une brosse à dents à poils ordinaires ou souples qui a été immergée dans la solution. Vous devez vous brosser les gencives chaque soir après avoir mangé. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un dentifrice après l'utilisation de la solution. En cas d'irritation ou de réaction allergique suite à l'utilisation de la solution de brossage gingival et dentaire, CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

**NE MANGEZ PAS ET N'AVEZ PAS LE COMPRIMÉ. LE COMPRIMÉ DOIT ÊTRE DISSOUS DANS 15 ML D'EAU TIÈDE POUR CRÉER UNE SOLUTION QUI SERA UTILISÉE POUR LE BROSSAGE DES GENCIVES/DENTS SUITE À UN TRAITEMENT DENTAIRE RÉCENT. NE BUVEZ PAS LA SOLUTION.**



Fig. 1



Fig. 2

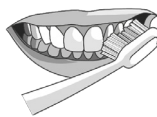


Fig. 3

## Notice d'utilisation

Veuillez lire les mises en garde et les précautions avant toute utilisation.

1. Remplissez le récipient spécialement prévu à cet effet avec 15 ml d'eau tiède en utilisant le repère de 15 ml sur le récipient. Retirez soigneusement un comprimé de la plaquette thermoformée et mettez-le dans l'eau tiède (Figure 1). Lavez-vous les mains après avoir manipulé le comprimé.
2. Immergez votre brosse à dents neuve dans la solution et laissez s'écouler 15 minutes pour dissoudre complètement le comprimé et pour que les poils de la brosse à dents aient absorbé la solution (Figure 2). Il est préférable d'utiliser une brosse à dents à poils souples si vos gencives sont particulièrement sensibles après avoir subi le traitement dentaire.
3. Une fois le comprimé complètement dissous, brossez délicatement vos dents et vos gencives (intérieures et extérieures) à l'aide de la brosse à dents préalablement immergée (Figure 3). Ne rincez pas la brosse à dents avant de commencer le brossage. N'utilisez pas de dentifrice avant ou après le brossage. Il est recommandé d'immerger votre brosse à dents de 2 à 3 reprises dans la solution pendant quelques secondes et brossez-vous les dents et les gencives pendant 2 minutes. Avant de réimmerger votre brosse à dents dans la solution à chaque reprise, commencez par la rincer à l'eau. Éviter d'avaler la solution lorsque vous vous brossez les dents et les gencives. Il est normal que la solution ait une saveur amère.
4. Après le brossage, rincez-vous soigneusement la bouche avec de l'eau et jetez le reste de la solution (le cas échéant).
5. Répéter les points 1 à 4 chaque soir au cours des 9 prochains jours consécutifs.

## Mises en garde et précautions

Le produit est conçu pour être utilisé dans la cavité orale, sur les gencives et sur les dents pour une durée de contact brève (environ 2 minutes). Ce produit est conçu pour une utilisation dans le domaine dentaire. Le comprimé/La solution est à usage unique valable pour un seul patient et doit être jeté(e) après sa première utilisation.

N'utilisez pas le produit si vous êtes allergique à l'un de ses composants ou aux persulfates. L'ingestion accidentelle d'un comprimé ou de la solution, ou une réaction allergique, peut entraîner une irritation, un gonflement ou des difficultés respiratoires après la première ou toute utilisation ultérieure. Si cela se produit, cessez d'utiliser le produit et consultez un médecin. En cas de réaction sévère, contactez immédiatement un centre antipoison. Tout contact direct de la poudre du comprimé avec les yeux peut entraîner une lésion oculaire. En cas de projection dans les yeux : rincez immédiatement à grande eau et contactez immédiatement le centre antipoison. Lavez-vous les mains avec soin après avoir manipulé le comprimé. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, veuillez consulter un médecin avant d'utiliser le produit.

## Recommandations en matière de stockage

Tenez hors de portée des enfants ou de toute personne ayant des difficultés à lire ou à comprendre les étiquettes. Stockez dans un endroit sec à température ambiante. Ne congélez pas et ne réfrigérez pas le produit. N'utilisez pas le produit après la date de péremption.

**Contient:** 1 récipient à brosse à dents, 1 plaquette thermoformée de 10 comprimés, 1 notice.

## NL • Productbeschrijving en beoogd gebruik

PerioTabs helpt om gingivitis, parodontitis, peri-mucositis en peri-implantitis te verminderen. Dit product wordt gebruikt voor het poetsen van tanden en tandvlees. Alleen gebruiken op advies van uw tandarts. Raadpleeg in alle andere gevallen eerst uw tandarts/arts voor u het gebruikt.

De procedure bestaat uit het poetsen van tanden en tandvlees met behulp van de in lauwwarm water opgeloste tabletten. Elke kit bevat 10 kleine bruistabletten (1 tablet per dag voor 10 dagen). Er dient één tablet te worden opgelost in 15ml lauw water in de speciaal hiervoor meegeleverde houder zodat er een poetsoplossing ontstaat voor het tandvlees en de tanden. Het poetsproces wordt uitgevoerd met een gewone tandenborstel of tandenborstel met zachte haartjes onder de de oplossing onder te dompelen. De patiënt moet de tanden en tandvlees elke avond na het eten poetsen. Er is geen tandpasta meer nodig wanneer de oplossing wordt gebruikt. In geval van irritatie of allergische reactie na het gebruik van de poetsoplossing voor het tandvlees en de tanden, ROEP ONMIDDELIJK MEDISCHE HULP IN.

**DE TABLET NIET OPETEN OF INSLIKKEN. DE TABLET DIENT TE WORDEN OPGELOST IN 15 ML LAUW WATER ZODAT ER EEN OPLOSSING ONTSTAAT DIE ZAL WORDEN GEBRUIKT OM HET TANDVLEES EN TANDEN TE POETSEN NA DE RECENTE TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING. DE OPLOSSING NIET DRINKEN.**

## Gebruiksaanwijzingen

Gelieve voor het gebruik de waarschuwingen te lezen.

1. Vul de speciaal meegeleverde houder met 15 ml lauw water en gebruik hiervoor het 15 ml-maatstreepje op de houder. Haal voorzichtig één tablet uit de blisterverpakking en leg het in het lauw water (Figuur 1). Was uw handen nadat u de tablet heeft aangeraakt.
2. Dompel uw nieuwe tandenborstel in de oplossing en laat de tablet 15 minuten volledig oplossen en de haartjes van de tandenborstel de oplossing absorberen (Figuur 2). Gebruik bij voorkeur een tandenborstel met zachte haartjes als uw tandvlees extra-gevoelig is.
3. Zodra de tablet volledig opgelost is, poetst u voorzichtig uw tanden en het tandvlees (binnen- en buitenkant) met de ondergedompelde tandenborstel (Figuur 3). Spoel voor het poetsen de oplossing niet van de tandenborstel. Gebruik voor of na deze spoelsessie geen tandpasta. Aangeraden wordt om 2 minuten lang uw tanden en tandvlees te poetsen en tijdens het poetsen uw tandenborstel 2 à 3 keer gedurende enkele seconden in de oplossing onder te dompelen. Spoel uw tandenborstel eerst schoon met stromend water voor u uw tandenborstel opnieuw onderdompelt. Vermijd inslikken van de vloeistof tijdens het poetsen van uw tanden en tandvlees. Het is normaal dat de oplossing bitter smaakt.
4. Spoel na het poetsen uw mond grondig met water en verwijder de resterende oplossing (indien van toepassing).
5. Herhaal punt 1-4 iedere avond, 9 dagen achter elkaar.

## Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Het product is bestemd voor gebruik in de mondholte, op het tandvlees en op de tanden gedurende een korte contacttijd (ongeveer 2 minuten). Dit product werd ontwikkeld voor gebruik in de tandheelkunde. De tablet/oplossing is voor eenmalig gebruik en voor één patiënt en dient na het eerste gebruik te worden weggegooid.

Niet gebruiken indien u allergisch bent voor eender welk van de ingrediënten of voor persulfaten. Het per ongeluk innemen van de tablet of van de oplossing, of een allergische reactie kan na het eerste of later gebruik leiden tot irritatie, zwelling of ademhalingsmoeilijkheden. Als dit gebeurt, stopt u het gebruik van het product en roept u medische hulp in. Indien er een ernstige reactie optreedt, contacteert u onmiddellijk een antificentrum.

Direct oogcontact met het tabletpoeder kan oogschade veroorzaken. Bij contact met de ogen: Direct schoonspoelen met veel water en meteen contact opnemen met een antificentrum. Was uw handen grondig na het aanraken van de tablet. Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, raadpleeg dan eerst een arts voor u het product gebruikt.

## Bewaaradviezen

Buiten bereik van kinderen houden alsook van personen die niet goed kunnen lezen en/of de symbolen niet begrijpen. Droog en bij kamertemperatuur bewaren en uit de buurt van direct zonlicht en hittebronnen houden. Bewaar het product niet in de koelkast of de diepvriezer. Gebruik het niet na de vervaldatum.

**Inhoud:** 1 tandenborstelhouder, 1 blisterverpakking met 10 tabletten, 1 gebruiksaanwijzing.