


PerioTabs®

HR • Opis proizvoda i namijenjena uporaba

PerioTabs® pomaže pri smanjenju gingivitisa, periodontitisa, peri-mukozitisa i peri-implantitisa. Ovaj proizvod se koristi za čišćenje zubi i desni.

Postupak primjene sastoji se od čišćenja zubi i desni otopinom dobivenom otapanjem tableta u mlakoj vodi. Ovaj proizvod sadrži 10 malih šumećih tableta (1 tableta dnevno tijekom 10 dana). Jednu tabletu treba otopiti u 15 ml mlake vode u posebno namijenjenoj posudi kako bi se dobila otopina za čišćenje desni i zubi. Postupak čišćenja provodi se na način da se klasična ili meka četkica za zube uroni u pripremljenu otopinu. Potrebno je četkati svaku večer nakon jela. Nije potrebno koristiti pastu za zube pri uporabi otopine. U slučaju iritacije ili alergijske reakcije nakon primjene otopine za čišćenje zubi i desni, ODMAH POTRAŽITI HITNU LIJEČNIČKU POMOĆ.

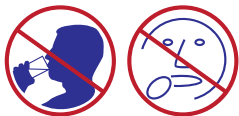

NEMOJTE ŽVAKATI ILI GUTATI TABLETU. TABLETU TREBA OTOPITI U 15 ML MLAKE VODE DA BI SE DOBILA OTOPINA KOJA ĆE SE PRIMIJENITI ZA ČIŠĆENJE DESNI/ZUBI. NEMOJTE PITI OTOPINU.


Upute za uporabu



Slika 1



Slika 2

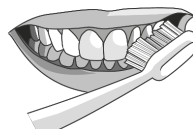

Slika 3

Molimo Vas da prije uporabe pročitate dio Upozorenja i mjere opreza.

1. Napunite posebno namijenjenu posudu s 15 ml mlake vode do oznake od 15 ml na posudi. Pažljivo izvadite jednu tabletu iz blister pakiranja i stavite je u mlaku vodu (slika 1). Operite ruke nakon diranja tablete.
 2. Uronite novu četkicu za zube u otopinu i ostavite na 15 minuta kako bi se tableta u potpunosti otopila, te da bi vlakna četkice za zube apsorbirala otopinu (slika 2). Ukoliko su Vaše desni naročito osjetljive, preporučuje se uporaba meke četkice za zube.
 3. Nakon što se tableta u potpunosti otopila, nježno očistite zube i desni (s unutrašnje i vanjske strane) pomoću četkice koju ste prethodno uronili u pripremljenu otopinu (slika 3). Nemojte prije čišćenja isprati otopinu sa četkice za zube. Nemojte koristiti pastu za zube prije ili poslije ovog postupka čišćenja.
- Preporučuje se uroniti četkicu za zube u otopinu 2 do 3 puta u trajanju od nekoliko sekundi, a zube i desni četkati u trajanju od 2 minute. Prije svakog ponovnog uranjanja četkice za zube u otopinu, prvo ju isperite pod mlazom vode. Izbjegavajte gutanje otopine tijekom čišćenja zubi i desni. Gorak okus otopine je normalan.
4. Nakon čišćenja, temeljito isperite usta vodom, a preostalu otopinu bacite (ako je ima).
 5. Ponovite korake 1-4 svaku večer tijekom sljedećih 9 uzastopnih dana.

Upozorenja i mjere opreza

Proizvod je namijenjen za uporabu u usnoj šupljini, na desnim i zubima tijekom kratkog vremena primjene (pribl. 2 minute). Tableta / otopina je namijenjena za jednokratnu uporabu i za jednog pacijenta, a ostatak nakon prve uporabe treba baciti.

Nemojte koristiti ako postoji alergija na bilo koji od navedenih sastojaka ili na persulfate. Slučajno uzimanje tablete ili otopine, te pojava alergijske reakcije mogu dovesti do iritacije, oticanja ili poteškoća s disanjem nakon prve ili bilo koje kasnije uporabe. Ako se to dogodi, prekinite uporabu i potražite liječničku pomoć. U slučaju teške reakcije odmah kontaktirajte centar za kontrolu otrovanja.

Izravni kontakt praška tablete s očima može uzrokovati njihovo oštećenje. Ako dospije u oči: odmah isprati s puno vode i smjesta kontaktirati centar za kontrolu otrovanja. Nakon diranja tablete temeljito oprati ruke. Ako ste trudni ili dojite, obratite se liječniku prije uporabe proizvoda.

Upute za skladištenje

Čuvati izvan dohvata djece ili osoba koje imaju teškoće sa čitanjem i praćenjem oznaka. Čuvati na suhom mjestu pri sobnoj temperaturi. Proizvod ne zamrzavati ili odlagati u hladnjak. Ne koristiti nakon isteka roka valjanosti.

Sadržaj

1 spremnik za četkicu za zube, 1 blister od 10 tableta, 1 upute za uporabu.

Sastav / Состав / Compoziție

Citric Acid, Sodium Lauryl Sulfate, Lactose Monohydrate, Sodium Bicarbonate, Sodium Chloride, Potassium Monopersulfate, Sodium Carbonate, Peppermint Flavour, PVP.



Čuvati izvan dohvata djece / Хранити в недоступном для детей месте / A nu se lăsa la îndemâna copiilor.



Made in Switzerland



Proizvođač / Изготовитель /
Produs de:

bonyf AG

Heiligkreuz 16
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein - EUROPE
Tel: +423 232 78 15
www.bonyf.com

