

PerioTabs®

RU - Описание продукта и показания к применению

PerioTabs® помогает снизить гингивит, периодонтит, перимукозит и перимплантит. Данный продукт применяется для чистки зубов и десен.

Процедура включает в себя чистку зубов и десен раствором данных таблеток в теплой воде. Продукт содержит 10 небольших шипучих таблеток (по 1 таблетке в день в течение 10 дней). Растворить одну таблетку в 15 мл теплой воды в специально прилагаемом контейнере, чтобы приготовить раствор для чистки десен и зубов. Процесс чистки проводится щеткой средней жесткости или мягкой щеткой, которую погружают в раствор. Выполняйте чистку каждый вечер после приема пищи. При использовании раствора чистить зубы зубной пастой не требуется. В случае раздражения или аллергической реакции при использовании данного раствора НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ.

НЕ ПРИНИМАТЬ ИЛИ НЕ ПРОГЛАТЫВАТЬ TABLETKY. РАСТВОРИТЬ TABLETKY В 15 МЛ ТЕПЛОЙ ВОДЫ, ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР ДЛЯ ЧИСТКИ ДЕСЕН/ЗУБОВ. НЕ ПИТЬ РАСТВОР.



R0 - Descrierea produsului și utilizarea preconizată

PerioTabs® ajută la reducerea gingivitei, periodontitei, perimucozitei și perimplantitei. Acest produs se utilizează pentru periajul dinților și gingiilor.

Procedura constă în periajul dinților și gingiilor cu tabletele furnizate, dizolvate în apă călduță. Acest produs conține 10 tablete efervescente mici (1 tabletă pe zi, timp de 10 zile). O tabletă trebuie dizolvată în 15 ml de apă călduță, în recipientul furnizat special, pentru a obține soluția pentru periajul gingiilor și dinților. Periajul se efectuează cu o periută de dinți cu peri normali sau moi, după scufundarea acesteia în soluție. Trebuie să efectuați periajul în fiecare seară, după mâncare. Nu este necesar să folosiți pastă de dinți atunci când utilizați soluția. În cazul în care apare o iritație sau reacție alergică după utilizarea soluției pentru periajul gingiilor și dinților, SOLICITAȚI IMEDIAT ASISTENȚĂ MEDICALĂ.

NU MESTECAȚI ȘI NU ÎNGHIȚIȚI TABLETA. TABLETA TREBUIE DIZOLVATĂ ÎN 15 ML DE APĂ CALDUTĂ PENTRU A OBTINE O SOLUȚIE CARE SE VA UTILIZA PENTRU PERIAJUL GINGIILOR/DINȚILOR. NU BEȚI SOLUȚIA.



рис / Figura 1



рис / Figura 2

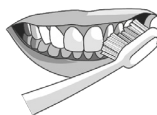


рис / Figura 3

Инструкция по применению

Перед использованием прочесть "Предостережения и меры предосторожности".

1. Наполнить прилагаемый специальный контейнер 15 мл теплой воды до отметки "15 мл". Осторожно извлечь одну таблетку из блистерной упаковки и поместить ее в теплую воду (рис. 1). Помыть руки после контакта с таблеткой.
2. Погрузить новую зубную щетку в раствор и дать таблетке полностью раствориться, а щетинкам зубной щетки впитать раствор в течение 15 минут (рис. 2). При чувствительной десен желательно использовать зубную щетку с мягкой щетиной.
3. После полного растворения таблетки аккуратно почистить зубы и десны (внутри и снаружи) щеткой, пропитанной раствором (рис. 3). Перед чисткой не смывать раствор с зубной щетки. Не использовать зубную пасту до или после процедуры чистки. Рекомендуется погружать зубную щетку 2-3 раза в раствор на несколько секунд и чистить в течение 2 минут. Перед каждым повторным погружением зубной щетки в раствор сначала ополаскивать ее водой. Избегать проглатывания раствора во время чистки зубов и десен. Раствор обычно горький на вкус.
4. После чистки тщательно прополоскать полость рта водой и вылить остатки раствора (при наличии).
5. Повторять шаги 1-4 каждый вечер в течение 9 дней подряд.

Предостережения и меры предосторожности

Продукт предназначен для применения в полости рта на деснах и зубах с непродолжительным временем воздействия (около 2 минут). Таблетка/раствор предназначены для однократного применения одним пациентом и подлежат утилизации после использования.

Не применять при наличии аллергии на любой из ингредиентов или персульфаты. Случайное проглатывание таблетки или раствора или аллергическая реакция могут привести к раздражению, отеку или затруднению дыхания после первого или последующего применения. В этом случае прекратить применение и обратиться за медицинской помощью. В случае тяжелой реакции немедленно обратиться в токсикологический центр.

Попадание порошка таблеток в глаза может привести к повреждению глаз. При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды и сразу обратиться в токсикологический центр. Тщательно помыть руки после контакта с таблеткой. В случае беременности или кормления грудью перед применением продукта обратиться за консультацией к врачу.

Рекомендации по хранению

Хранить в недоступном для детей месте и вдали от лиц, имеющих затруднения с чтением или соблюдением указаний на этикетках. Хранить в сухом месте при комнатной температуре. Нельзя замораживать и охлаждать данный продукт. Не применять по истечении срока годности.

Содержимое: 1 контейнер для зубной щетки, 1 блистерная упаковка с 10 таблетками, 1 инструкция по применению.

Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să citiți avertizările și precauțiile înainte de utilizare.

1. Umpleți recipientul furnizat special cu 15 ml de apă călduță utilizând marcajul de 15 ml de pe recipient. Scoateți cu grijă o tabletă din ambalajul de tip blister și introduceți-o în apa călduță (Figura 1). Spălați-vă pe mâini după ce atingeți tableta.
 2. Scufundați o periută de dinți nouă în soluție și așteptați 15 minute pentru ca tableta să se dizolve complet, iar periută de dinți să absoarbă soluția (Figura 2). Este preferabil să utilizați o periută cu peri moi dacă aveți gingiile foarte sensibile.
 3. După ce tableta s-a dizolvat complet, periați ușor dinții și gingiile (pe partea interioară și pe partea exterioară) folosind periută care a stat în soluție (Figura 3). Nu clățiți soluția de periută înainte de periaj. Nu folosiți pastă de dinți nici înainte, nici după această ședință de periaj.
- Se recomandă să scufundați periută de dinți de 2-3 ori în soluție, timp de câteva secunde, și să periați timp de 2 minute. Înainte de a scufunda din nou periută de dinți în soluție de fiecare dată, clățiți-o mai întâi cu apă. Evitați înghițirea soluției în timp ce vă periați dinții și gingiile. Este normal ca soluția să aibă un gust amar.
4. După periaj, clățiți-vă bine gura cu apă și aruncați soluția rămasă (în cazul în care a rămas soluție).
 5. Repetați pașii 1-4 în fiecare seară în următoarele 9 zile consecutive.

Avertizări și precauții

Produsul este destinat utilizării în cavitatea orală, pe suprafața gingiilor și dinților, cu un timp de contact scurt (aprox. 2 minute). Tableta/soluția este de unică folosință, pentru un singur pacient, și trebuie aruncată după prima utilizare.

Nu utilizați dacă sunteți alergic(ă) la oricare dintre ingrediente sau la persulfati. Înghițirea accidentală a tabletei sau soluției sau o reacție alergică poate determina iritație, umflare sau dificultăți de respirație după prima utilizare sau după orice utilizare ulterioară. Dacă se întâmplă acest lucru, întrerupeți utilizarea și solicitați asistență medicală. În cazul unei reacții severe, adresați-vă imediat unui centru toxicologic.

Contactul direct al ochilor cu pulberea din tabletă poate duce la afectarea ochilor. Dacă intră în ochi: clățiți imediat cu apă din abundență și adresați-vă imediat unui centru de toxicologic. Spălați-vă bine pe mâini după ce atingeți tableta. Dacă sunteți însărcinată sau alăptați, consultați medicul înainte de a utiliza produsul.

Recomandări privind păstrarea

A nu se lăsa la îndemâna copiilor sau a altor persoane care au dificultăți de citire sau respectare a etichetelor. A se păstra la loc uscat și la temperatura camerei. Nu congelați și nu refrigerați produsul. Nu utilizați după data expirării.

Conținut: 1 recipient pentru periută de dinți, 1 blister cu 10 tablete, 1 document cu instrucțiuni de utilizare.